

Bij thuisgebruik



1

Vorbereitung

- Demonteer de **PARI O-PEP**
- Plaats de kogel zodanig dat deze niet kan weggrollen
- Verwijder het koord van het onderste deel



2

Reinigen

- Reinig de onderdelen met vaatwasmiddel in warm water
- Spoel de afzonderlijke onderdelen grondig na onder een lopende kraan



3

Desinfectie

- Kook de onderdelen in een voldoende hoeveelheid kokend water (5 minuten) **of**
- Gebruik een stoomsterilisator (tenminste 6 minuten)



4

Drogen

- Plaats alle onderdelen op een schone, droge en absorberende ondergrond



5

Opbergen

- Na het drogen bergt u alle afzonderlijke onderdelen op in de daarvoor bijgeleverde opbergtas.

Gelieve altijd de gebruiksinstructies te volgen. Deze worden verstrekt bij alle **PARI O-PEPs** en bevatten een gedetailleerde beschrijving. Indien de gebruikersinstructies ontbreken, kunnen nieuwe exemplaren worden gedownload vanaf www.pari.com/de-en of kunt u bellen met +49 (0) 8151 – 279 220.

CE  **PARI GmbH**
Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY
E-Mail: info@pari.de
Tel. +49(0) 8151 279-0
Fax +49(0) 8151 279-101

Mehr Infos unter: www.pari.com/de-en



D&M

(Diagnostica en Medische Hulpmiddelen) B.V.
Postbus 229, 3700 AE ZEIST
Tel: 030 699 58 59
Fax: 030 699 23 09
mail: dm@dmhulpmiddelen.nl
website: www.dmhulpmiddelen.nl
en op
www.curatheek.nl

01800036-8-08/2015



PARI O-PEP

TRILT EFFECTIEF BRONCHIAAL SLIJM LOS
EN HELPT DE LUCHTWEGEN TE OPENEN

Tips voor gebruik en hygiëne

www.pari.com/de-en

Trilt effectief bronchial slijm los en helpt de luchtwegen te openen

Voor tijdelijk gebruik om vastzittend slijm te mobiliseren bij acute of chronische aandoeningen aan de luchtwegen, zoals Cystische fibrose (CF), bronchiëctasieën, COPD en astma.

- Comfortabele behandeling door ovaal mondstuk
- Stopt niet-productief hoesten en belemmerde ademhaling.
- Bevat een kleine draagtas om hygiënisch op te bergen en voor veilig vervoer.
- Instrumentenvaatwasser veilig en autoclaveerbaar



Artikelnr. 018G5000

Montage

- Plaats de trechter in het onderste deel van de behuizing (zie foto).
- Plaats de kogel in de trechter
- Schroef het bovenste deel van de behuizing op het onderste deel



De PARI O-PEP gebruiken

- Ga rechtop zitten in een ontspannen houding
- Plaats het mondstuk tussen uw tanden en omsluit het met uw lippen
- Adem rustig en diep in door uw neus. Houd uw adem in voor ongeveer 1 tot 2 seconden.
- Adem rustig en volledig uit door uw mond in de **PARI O-PEP**. Terwijl u uitademt, spant u uw wangspieren om uw wangen stil te houden.
- Herhaal deze cyclus van in- en uitademen 10 tot 15 keer.



Om volledig profijt te hebben van het therapeutische effect van de **PARI O-PEP**, dient u de behandeling uit te voeren zoals uw arts of therapeut u geïnstrueerd heeft.

Gelieve altijd de gebruiksinstructies te volgen. Deze worden verstrekt bij alle **PARI O-PEPs** en bevatten een gedetailleerde beschrijving. Indien de gebruikersinstructies ontbreken, kunnen nieuwe exemplaren worden gedownload vanaf www.pari.com/de-en of kunt u bellen met +49 (0) 8151 – 279 220.